


Quality time for better care

Quality time for better care は、医療に関わるすべての人々に
今よりも「質の高い時間」を創出することを目指す
Terumo Medical Care Solutions のブランドプロミスです。

TERUMO
MEDICAL CARE
SOLUTIONS

HOSPITAL CARE

テルフェージョン™ 小型シリンジポンプ TE-362

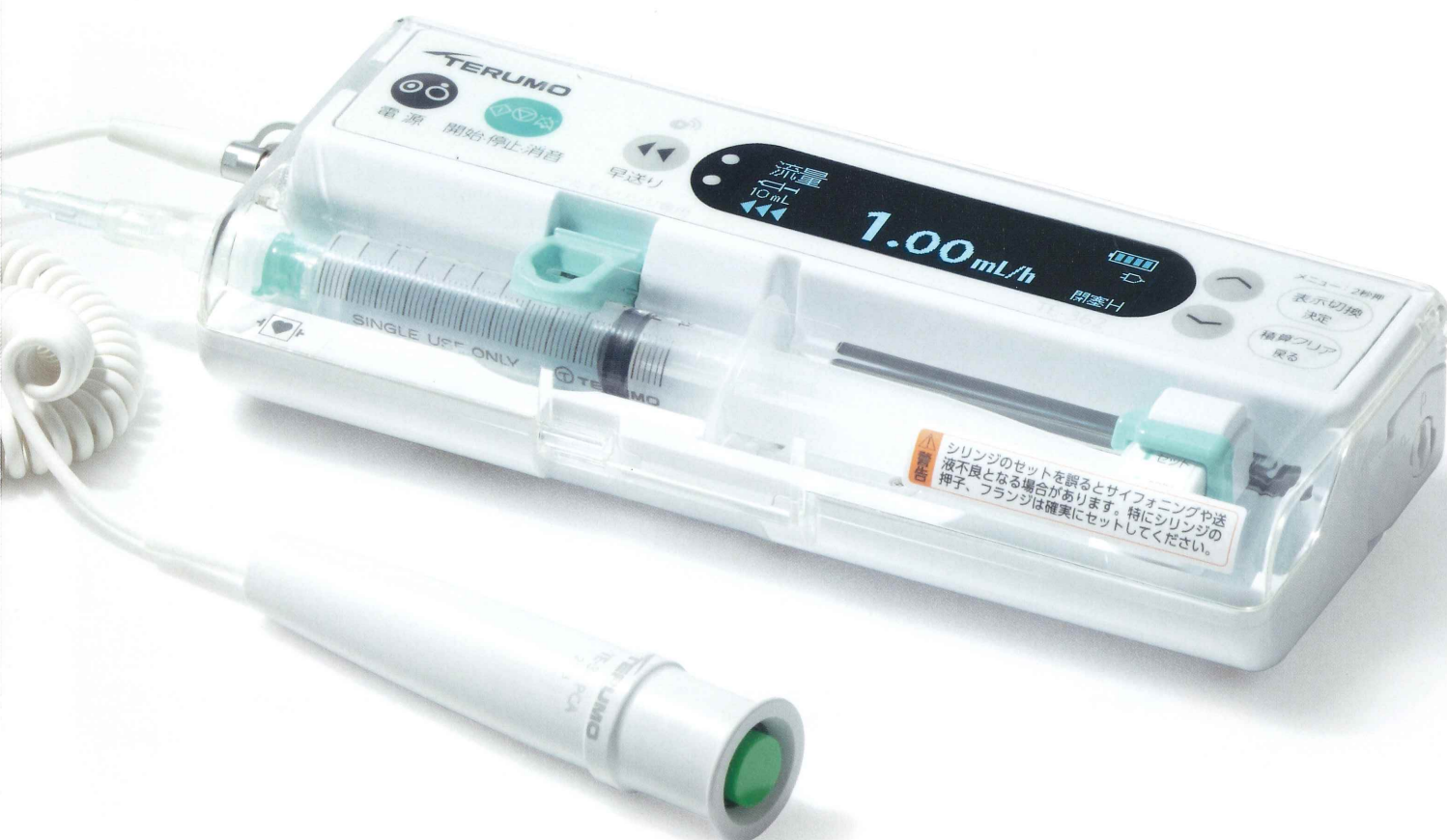

変わらぬ操作で
より安全に、使いやすく。




2003 医療事故防止対策通知*対応

本マークは医療事故対策のために設定された厚生労働省基準に適合することを示す業界の自主的なマークです。

*関連企業を対象とした厚生労働省通知「輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について」医薬発第0318001号：平成15年3月18日

従来のままの操作性で、
さらに機能性を高めました。

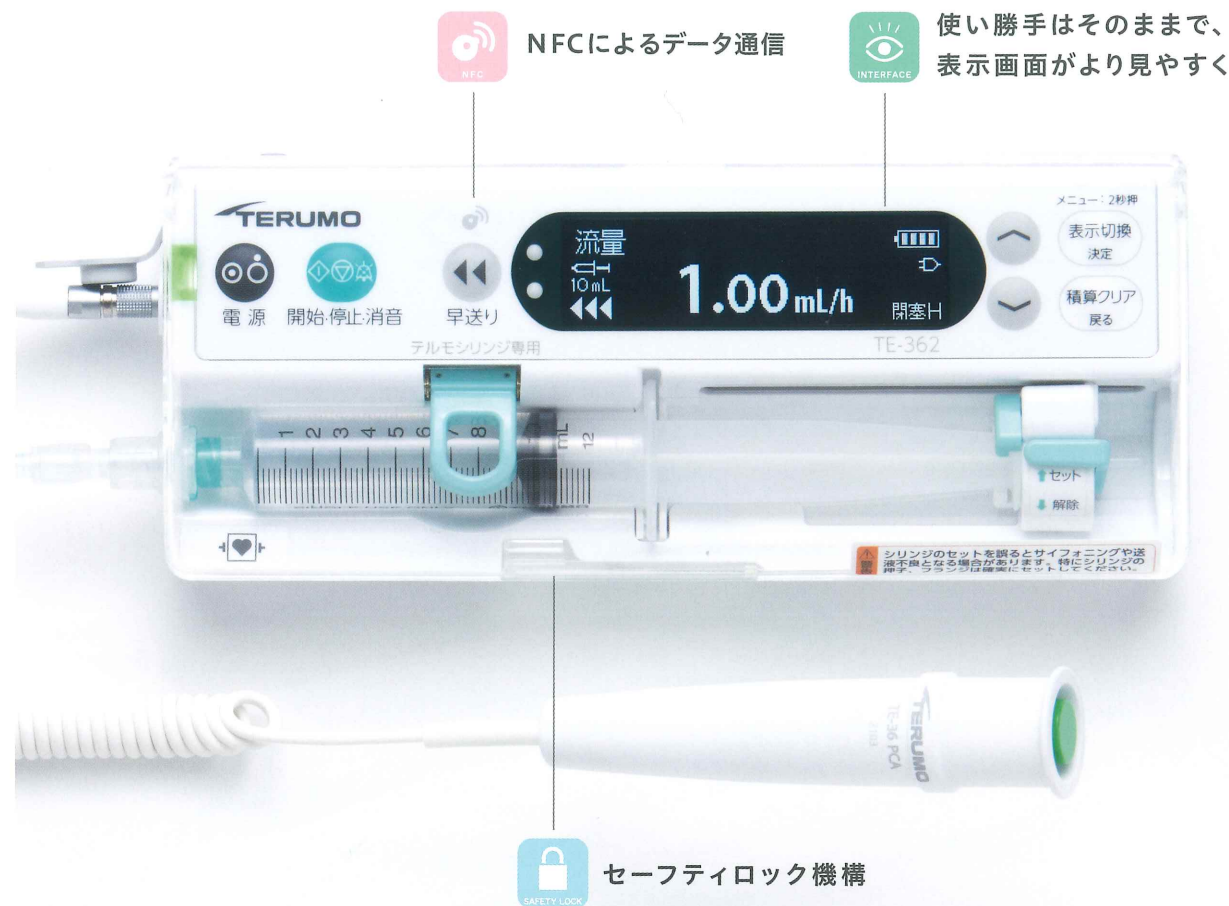

清掃性



疼痛管理を
サポートする機能を搭載



ワンタッチポールクランプ



使い勝手はそのままで、
表示画面がより見やすく

■ 使い勝手はそのまま

スイッチの配置、シリンジのセット方法は従来品*と同じです。
適用シリンジ: テルモシリンジ 5mL、10mL、指定の薬剤充填シリンジ。

*テルフュージョン小型シリンジポンプTE-361



■ 表示部は有機EL

視認性向上のために有機ELディスプレイを採用。ナイトモード機能を搭載。指定した時間帯で画面の輝度(明るさ)を自動調整可能です。



疼痛管理を
サポートする機能を搭載

■ PCA機能 (TE-362PCAのみ)

疼痛緩和療法に対応するため、設定した量を追加投与できる機能。従来品*と比べ、PCA機能の設定範囲を拡充し、より使いやすくなりました。

操作方法: PCAスイッチを押す。

*テルフュージョン小型シリンジポンプTE-361



■ PCAボラス投与の履歴を確認可能

ボラス投与の有効、無効回数、累積積算量などを表示します。



■ レスキュー機能 (出荷時: 無効)


設定した予定量を追加投与できる機能。設定したボラス量の投与が可能です。

操作方法: 予定量を設定し、早送りスイッチを1回押す。

■ テルフュージョンPCAManager

別売品

投与管理ソフトウェアです。NFC通信を利用して、動作履歴(履歴)から投与状況の推移をグラフ表示したり、ポンプ設定の読み込み/書き込みが可能です。

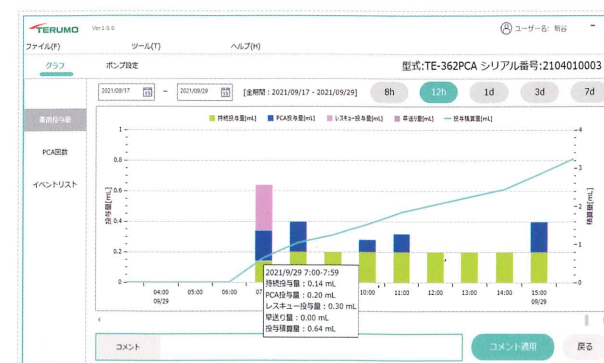

清掃性

■ 消毒用エタノールで清掃可能

消毒液の使用にあたっては、取扱説明書および各消毒液の電子添文(希釈濃度等)に従ってください。



NFCによるデータ通信

かざせば自動でデータ転送し、業務の効率化と転記ミスを防ぎます。HRジョイント*対応。


*HRジョイントとは、『NFC通信機能を有するテルモの医療機器等と情報システムとの連携』によるソリューションを指します。



セーフティロック機構

従来品*に比べ、セーフティロックを使用しやすくなりました。

*テルフュージョン小型シリンジポンプTE-361

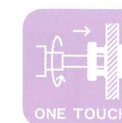

別売品

ワンタッチポールクランプ

業務の効率化をサポートするために、スタンドへの設置が簡単に行える「ワンタッチポールクランプ」を設定。



テルフュージョン™ 小型シリンジポンプ TE-362

■テルフュージョン小型シリンジポンプTE-362

コード番号	PCA機能	共通商品コード(JAN)	希望小売価格(別税)
TE-362N	なし	4987892132827	364,560円
TE-362PCA	あり	4987892132834	411,600円

●仕様

販売名	テルフュージョン小型シリンジポンプTE-362		
型式/コード番号	TE-362N、TE-362PCA		
適用シリンジ	テルモシリンジ、指定の薬剤充填シリンジ		
シリンジサイズ/ シリンジメーカー	5mL、10mL / シリンジメーカー 自社および指定メーカー		
投与モード	持続投与、レスキューボーラス投与※1,3、PCAボーラス投与※2		
流量設定範囲	0.05 ～ 30.00mL/h (5mL シリンジ使用時) 0.05 ～ 60.00mL/h (10mL シリンジ使用時) 0.05mL/h ステップ (0.05 ～ 10.00mL/h 時) 0.10mL/h ステップ (10.00 ～ 60.00mL/h 時)		
レスキューボーラス 投与量範囲	0.05mL ～ 4.00mL (0.05mL ステップ) (電源投入時: 0.00mL)		
PCAボーラス予定量 設定範囲※2	・予定量を流量設定値(mL/h)に時間を、0.25h 相当量～4.00h 相当量 乗じた値(時間量)で設定する場合※1 (0.25h ステップ) ・予定量を薬液量(mL)で設定する場合※1,3: 0.00～4.00mL (0.05mL ステップ) (電源投入時: 0.00mL)		
PCAボーラス予定量 上限設定範囲※2	0.10 ～ 4.00mL (0.10mL ステップ)		
不応期設定範囲※2	5 ～ 120min 出荷時: 60min (5 ～ 30min: 1min ステップ、30 ～ 120min: 5minステップ)		
PCAボーラス回数 範囲※2	1 ～ 12 回/h (1 回ステップ)、フリー (回数制限なし)		
積算量表示範囲	0.00～99.99mL (0.01mLステップ)		
流量精度	・機械精度 ±1%以内 (流量≧1.00mL/h) ・シリンジを含む精度 ±3%以内 (1.00mL/h 以上の一定流量にて、 送液開始1時間以降の1時間ごとの精度)		
閉塞検出圧	40～110kPa(設定値)閉塞圧検出は3(L、M、H)段階で設定可能		
早送り流量	約60mL/h (10mLシリンジ使用時) 約30mL/h (5mLシリンジ使用時)		
安全装置	閉塞警報、残量/閉塞警報、残量警報、シリンジ外れ警報、押子外れ警報、 電源アダプタ異常警報、バッテリー異常警報、バッテリー低下警報、シャットダウン 予告警報、電源異常警報、再警報、開始忘れ警報、シリンジ未設定警報、 流量未設定警報、PCA ケーブル断線警報※2、押子検出エラー		
安全機能	閉塞検出圧設定値切換機能、残量警報位置切換機能※1,3、流量上限設定機能※1、 キーロック機能、不応期設定機能※2、PCA ボーラス予定量上限設定機能※2、 PCA ボーラス回数設定機能※2、PCA パラメータパスコード機能※1,2,3、 閉塞時内圧緩和機能		
付加機能	シリンジ装着状態お知らせ機能、シリンジサイズ表示機能、積算量クリア機能、 ブザー音量切換機能、履歴表示機能、スタンバイ機能※1,3、ポンプ動作情報等 通信機能、早送り量上限値設定機能※1,3、設定値記憶機能※1,3、AC 電源検出機能、 AC 電源検出ブザー音機能、早送りブザー音機能※1、停止遅延ブザー音機能、 開始操作ブザー音機能、スタンバイ継続時間切換機能※1,3、未準備開始忘れ 切換機能※1,3、表示明るさ切換機能、メンテナンスタイマ機能、日時設定機能、 早送り量加算機能※1、警報メモリディッチ機能※1、入力加速機能※1、継続投与 機能※1,3、ナイトモード機能※1,3、電源OFF ブザー音機能、表示切換機能1、 表示切換機能2、点検支援機能、レスキューボーラスブザー音機能※1、レスキュー ボーラス投与記録表示機能※1,3、PCA スイッチ操作ブザー音機能※2、PCA ボーラス 投与記録表示機能※1,2,3、PCA プリセット機能※2、PCA スイッチ外れ検出機能※2		
使用条件	周囲温度: 5 ～ 40℃ 相対湿度: 20 ～ 90% RH (結露なきこと) 気圧: 70 ～ 106kPa (700～1060hPa)		
保管条件	周囲温度: -20 ～ 45℃ 相対湿度: 10 ～ 95% RH (結露なきこと) 気圧: 50 ～ 106kPa (500～1060hPa)		
電源	AC100V 50-60Hz バッテリー連続使用時間: 48時間以上 (1.00mL/hでの連続送液、周囲温度25℃、新品バッテリー、満充電時) 充電時間: 15 時間以上 (電源切状態でAC 電源による充電時) 4 時間以上 (別売品の急速充電器により充電時) (電源切状態でAC 電源による充電時、周囲温度25℃、新品バッテリー) (電源アダプタを使用して8 時間、急速充電器の場合は90分で約50%の充電が可能)		
消費電力	11VA		
分類	クラスII 機器及び内部電源機器、耐除動形CF 形装着部、連続動作(運転) 機器、IP22		
外形寸法/質量	189(幅)×78(奥行)×36(高さ)mm(突起部を含む)/ 約300g(バッテリー無し)、約350g(バッテリー込)		
付属品	TE-362電源アダプタ、TE-362リチウムイオン充電式バッテリー、取扱説明書、 品質保証書、添付文書、PCA スイッチ(TE-362PCAのみ)		

※1: 当該機能については、有効無効等を設定可能 ※2: TE-362PCA にてPCA スイッチを装着した時のみ ※3: 出荷時無効

*本品は、医用電気機器の安全使用のために要求されているEMC(電磁両立性)規格、IEC 60601-1-2:2014(JIS T 0601-1-2:2018)に適合している装置です。

また、個別規格JIS T 0601-2-24:2018(IEC 60601-2-24:2012)(輸液ポンプ及び輸液コントローラの安全に関する個別要求事項)で要求されているEMCのレベルにも適合しています。

*製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する事があります。

●別売品

品名	コード番号	共通商品コード(JAN)	希望小売価格(別税)
TE-362電源アダプタ…①	XX-362AC	4987892136306	6,350円
TE-362リチウムイオン急速充電器…②	XX-KS362	4987892136290	41,160円
TE-362リチウムイオン充電式バッテリー…③	XX-362B	4987892136320	8,467円
TE-362キャリングケース…④	XX-362PT01	4987892136313	7,056円
TE-362セーフティロックセット…⑤	XX-362Z01	4987892136283	7,056円
TE-362ボールクランプ…⑥	XX-362P	4987892136276	21,168円
テルフュージョンPCA マネージャー (TE-362PCAのみ)	TE-SW362	4987892132841	235,200円



一般的名称: 患者管理無痛法用輸液ポンプ 販売名: テルフュージョン小型シリンジポンプTE-362 医療機器承認番号: 30300BZX00116000 特定保守管理医療機器
本製品の詳細は、電子添文及び取扱説明書をご参照ください。



テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 www.terumo.co.jp

記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。

© テルモ株式会社 2024 年 01 月
23T545-1LL55Z2401